

Gebrauchsanweisung

Allgemeine Hinweise

- Aus 97% Baumwolle und 3% Elasthan
- Frei von Latex und Medikamenten
- Luft- und wasserdurchlässig, sowie atmungsaktiv
- Hervorragende Haftung im Wasser
- Schränkt die Bewegung nicht ein

Nicht anzuwenden bei:

- Frischen Verletzungen der Haut oder offene Wunden
- Gerinnungsstörungen
- Gefäßpathologien (Thrombose)
- Akute, chronische Hauterkrankungen
- Allergien gegen einen der Inhaltstoffe im Tape oder Acrylkleber
(zunächst an einer kleinen Hautstelle testen)
- Maligne Tumore
- Schwangere dürfen das Tape nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt verwenden.
- Nicht für Patienten in Krebsbehandlung
- Bei Einnahmen von Medikamenten, die die Hautreaktion beeinträchtigen können
(Glucocorticoide, Antiallergika, topische Immunmodulatoren, etc.)
- Stark gebräunte Haut

Sollten durch das Anwenden des Tapes zur Hautirritationen kommen, entfernen Sie das Tape vorsichtig.

Vorsichtsmaßnahmen:

An den Körperstellen, die für den Patienten schwer zu erreichen sind, sollte das Tape von dem entsprechenden Fachpersonal geklebt werden.

Allgemeine Hinweise zu der Anlage von Tape:

- 1) Die Haut vor der Anwendung mit tape original Hautreinigung von Cremerückständen und anderen Verunreinigungen befreien.
- 2) Das Tape nur auf trockene und saubere Haut anlegen
- 3) Lokalisieren Sie den entsprechenden Muskelbereich
- 4) Messen Sie die entsprechende Länge des Tapes ab
- 5) Runden Sie die Ecken ab, um vorzeitiges Ablösen zu verhindern
- 6) Lösen Sie das Trägerpapier ca. 3-4cm vom Tape ab
- 7) Kleben Sie das Tape entsprechend Ihrer Beschwerden auf die Haut
 - Das Tape muss nach der Anlage warm gerieben werden, um den Kleber zu aktivieren
 - Das Tape sollte mindestens 30-60min vor sportlichen Aktivitäten angelegt werden
 - Das Tape zum Trocknen nur leicht abtupfen
- 8) Das Tape immer in Richtung des Haarwuchses und nicht ruckartig entfernen.

Lagerung

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zwischen 8°C und 25°C lagern.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Hersteller:
unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3
23611 Bad Schwartau
Germany

Kontakt:
0451/ 39890 530
E-Mail: info@unizell.de
www.unizell.de

Das Beste
für die Pflege.

unizell

Artikelbezeichnung: Tape Original Cross
Product name

Produktbeschreibung: Das tape original Cross Tape wird in der Therapie auf Schmerz,-Trigger oder
Product description Akkupunkturpunkte geklebt. Geeignet für eine alternative Behandlung frei von Medikamenten und anderen Wirkstoffen.

Tape Original Cross tape, for sticking on triggers or acupuncture points for therapy on pain. Suitable for an alternative treatment free of drugs and other active ingredients.

Material: 80% Baumwolle, 5% Elasthan, 15%Polyrethane
Material: 97% cotton, 3% elastane, 15% polyurethane


Qualitäts- Standards: Medizinprodukt Klasse I
Quality standards CE – Klassifizierung: Klasse I
CE – Kennzeichnungen auf allen Verpackungen
CE – Classification: Class I
CE – Marking on each packaging

Haltbarkeit:  3 Jahre
Shelf life  3 years

Tape Original Cross

Größe/Size	Art.Nr. / reference	Größe / size	EAN - Code	Stk. / Box Pcs. / box
Gr. A	13712535	2,7 x 2,1	4036978022627	20 x 9
Gr. B	13712541	3,5 x 2,8	4036978022634	20 x 6
Gr. C	13712558	5,2 x 4,4	4036978022689	20 x 2

Symbole:
Symbols

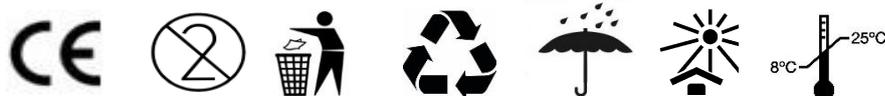

Hersteller:
unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Straße 3
23611 Bad Schwartau
Germany

Kontakt:
0451/ 39890 530
E-Mail: info@unizell.de
www.unizell.de

Das Beste
für die Pflege.

