

# Gebrauchsanweisung

## Allgemeine Hinweise

- Aus 97% Baumwolle und 3% Elasthan
- Frei von Latex und Medikamenten
- Luft- und wasserdurchlässig, sowie atmungsaktiv
- Hervorragende Haftung im Wasser
- Schränkt die Bewegung nicht ein

## Nicht anzuwenden bei:

- Frischen Verletzungen der Haut oder offene Wunden
- Gerinnungsstörungen
- Gefäßpathologien (Thrombose)
- Akute, chronische Hauterkrankungen
- Allergien gegen einen der Inhaltstoffe im Tape oder Acrylkleber  
(zunächst an einer kleinen Hautstelle testen)
- Maligne Tumore
- Schwangere dürfen das Tape nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt verwenden.
- Nicht für Patienten in Krebsbehandlung
- Bei Einnahmen von Medikamenten, die die Hautreaktion beeinträchtigen können  
(Glucocorticoide, Antiallergika, topische Immunmodulatoren, etc.)
- Stark gebräunte Haut

Sollten durch das Anwenden des Tapes zur Hautirritationen kommen, entfernen Sie das Tape vorsichtig.

## Vorsichtsmaßnahmen:

An den Körperstellen, die für den Patienten schwer zu erreichen sind, sollte das Tape von dem entsprechenden Fachpersonal geklebt werden.

## Allgemeine Hinweise zu der Anlage von Tape:

- 1) Die Haut vor der Anwendung mit tape original Hautreinigung von Cremerückständen und anderen Verunreinigungen befreien.
- 2) Das Tape nur auf trockene und saubere Haut anlegen
- 3) Lokalisieren Sie den entsprechenden Muskelbereich
- 4) Messen Sie die entsprechende Länge des Tapes ab
- 5) Runden Sie die Ecken ab, um vorzeitiges Ablösen zu verhindern
- 6) Lösen Sie das Trägerpapier ca. 3-4cm vom Tape ab
- 7) Kleben Sie das Tape entsprechend Ihrer Beschwerden auf die Haut
  - Das Tape muss nach der Anlage warm gerieben werden, um den Kleber zu aktivieren
  - Das Tape sollte mindestens 30-60min vor sportlichen Aktivitäten angelegt werden
  - Das Tape zum Trocknen nur leicht abtupfen
- 8) Das Tape immer in Richtung des Haarwuchses und nicht ruckartig entfernen.

## Lagerung

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zwischen 8°C und 25°C lagern.  
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Hersteller:  
unizell Medicare GmbH  
Pohnsdorfer Straße 3  
23611 Bad Schwartau  
Germany

Kontakt:  
0451/ 39890 530  
E-Mail: [info@unizell.de](mailto:info@unizell.de)  
[www.unizell.de](http://www.unizell.de)

Das Beste  
für die Pflege.

unizell

Artikelbezeichnung: tape original – Kinesiologic Tape  
Product name

Produktbeschreibung: Kinesiologic Tape, für eine alternative Behandlung frei von Medikamenten und anderen Wirkstoffen.  
Product description

Kinesiologic Tape, for an alternative treatment free from drugs and other substances.

Material: 97% Baumwolle, 3% Elasthan  
Material: 97% cotton, 3% elastane

Qualitäts- Standards: Medizinprodukt Klasse I  
Quality standards  
CE – Klassifizierung: Klasse I  
CE – Kennzeichnungen auf allen Verpackungen  
CE – Classification: Class I  
CE – Marking on each packaging

Haltbarkeit:  3 Jahre  
Shelf life 3 years

tape original – Kinesiologic Tape

Farbe / Colour	Art. Nr. / Reference	Größe / Size	EAN - Code	Rolle / Box roll / box
Beige / beige	7685834	5m x 5cm	4036978005828	1
Blau / blue	7685627	5m x 5cm	4036978005842	1
Orange / orange	10713215	5m x 5cm	4036978019689	1
Pink / pink	7685716	5m x 5cm	4036978005927	1
Rot / red	7685662	5m x 5cm	4036978005941	1
Schwarz / black	7685946	5m x 5cm	4036978005965	1
Violett / violet	7686288	5m x 5cm	4036978005989	1
Gelb / yellow	7686213	5m x 5cm	4036978005866	1
Grün / green	7685739	5m x 5cm	4036978005880	1
tape original MIX	7686331	5m x 5cm	4036978005903	1
Blau / blue	10144088	32 m x 5 cm	4036978018910	1
Pink / pink	10144094	32 m x 5 cm	4036978018934	1
Schwarz / black	10144119	32 m x 5 cm	4036978018958	1
Beige / beige	10144125	32 m x 5 cm	4036978018903	1

Symbole:  
Symbols

